

**Инструкция  
по применению изделия медицинского  
назначения**

**Название изделия медицинского назначения**

Раствор медицинский для офтальмологии: раствор офтальмологический стерильный «ВИС ГЛИК НЕО» (капли глазные стерильные)

**Состав и описание изделия:**

Состав капель:

N-ацетилкарнозин (1%), экстракт черники, хондроитина сульфат (0.15%), натрия фосфата додекагидрат, натрия фосфата моногидрат, натрия хлорид, вода для инъекций до 100 мл.

ВИСглик НЕО является стерильным офтальмологическим раствором с физиологическим значением рН. Не содержит консервантов.

Совместное воздействие таких натуральных веществ как N-ацетилкарнозин, экстракт черники и хондроитина сульфата в составе капель оказывает антиоксидантное действие на орган зрения, способствует поддержанию остроты зрения, в особенности при возрастных изменениях в хрусталике, а также, в суровых условиях окружающей среды или повышенной нагрузке.

Гидратационная способность хондроитина сульфата и вазопротекторные свойства черники способствуют регуляции микроциркуляции и улучшению питания глаза.

Комплекс защищает ткани глаз от свободных радикалов, что является важным элементом предотвращения окисления хрусталика.

Благодаря высокотехнологичному фильтру раствор без консервантов остается стерильным на протяжении всего срока его использования. Поскольку раствор не содержит консервантов, он может использоваться довольно часто.

**Наименование организации-производителя**


ОРКО Health Spain S.L.U., Испания

**Область применения:**

Область применения: местное применение в офтальмологии

**Назначение:**

Антиоксидантное действие, способствует поддержанию остроты зрения, в особенности при возрастных изменениях (в комплексной терапии катаракты), а также, в суровых условиях окружающей среды или повышенной нагрузке.

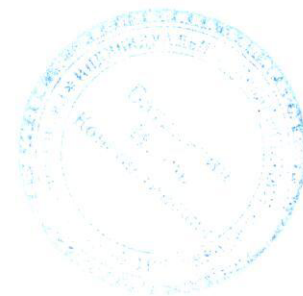

Вазопротекторное действие способствует улучшению микроциркуляции и трофики тканей глаза. Увлажняющее действие.

**Способ применения:**

Перед применением необходимо снять кольцо контроля первого вскрытия и затем колпачок с флакона вращательным движением. Перед первым применением рекомендуется перевернуть флакон наконечником вниз и надавливать на флакон до тех пор, пока из отверстия наконечника не появится первая капля. Флакон готов к последующему использованию. Рекомендуется закапывать по 1 капле в каждый глаз 2-3 раза в день по мере необходимости.

Сразу после использования необходимо закрыть флакон колпачком. Во время закапывания следует избегать какого-либо контакта наконечника флакона с глазами или кожей. Раствор может применяться с контактными линзами.

**Условия хранения:** При температуре не выше 25 °С.

**Срок годности**

3 года.

Срок хранения после вскрытия упаковки не более 3 месяцев.

Не применять после истечения срока годности!

**Стерильно**

**Наименование, юридический адрес организации-производителя изделия медицинского назначения, адрес местонахождения производства**  
ОРКО Health Spain S.L.U., Испания

**Владелец регистрационного удостоверения:**  
ОРКО Health Spain S.L.U., Испания

**Наименование нормативного документа, в соответствии с которым произведено изделие медицинского назначения**  
Директива Совета Европы 93/42/ЕЭС по медицинским приборам


**Побочное действие**

Поскольку капли не содержат консервантов, они хорошо переносятся даже при длительном применении.

**Противопоказания**

Индивидуальная непереносимость компонентов.

**Меры предосторожности:**

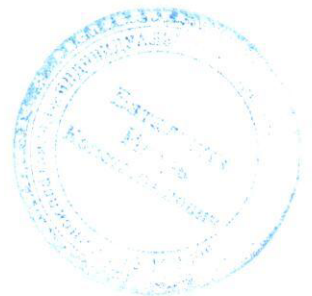

- Не использовать в случае повреждения упаковки.
- Не использовать в случае непереносимости любого компонента препарата.
- Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.
- Избегать контакта капельницы с поверхностью глаза.
- Необходимо переждать 10-15 минут после использования препарата, перед применением других офтальмологических лекарственных препаратов для местного применения.
- Использовать не более 3 месяцев после вскрытия упаковки.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Только для внешнего применения в офтальмологии.

