



BERLIN-CHEMIE  
MENARINI



## Инструкция по применению

### КВИКС®

Нос можно назвать воротами и защитой дыхательных путей. Здоровый нос очищает вдыхаемый воздух от пыли, увлажняет и нагревает его до температуры тела, подготавливая к проникновению в легкие. Простуда, грипп и аллергии, сопровождаемые насморком, затрудняют выполнение данных функций. «КВИКС®» снимает заложенность носа и помогает восстановить его нормальную работу, а также улучшает носовое дыхание.

### 1. ЧТО ТАКОЕ «КВИКС®» И КАК ОН ДЕЙСТВУЕТ

В 100 мл спрея «КВИКС®» содержится 84,6 мл натуральной океанической воды и 15,4 мл очищенной воды. Раствор прозрачный, без цвета и запаха.

«КВИКС®» представляет собой назальный спрей, содержащий воду Атлантического океана в оптимальной концентрации (содержание соли 2,6%). Эта вода обладает уникальной комбинацией целебных минералов и микроэлементов.

«КВИКС®» оказывает естественную помощь заложенным носовым ходам и околоносовым пазухам, а также увлажняет слизистую оболочку носа, что особенно важно для поддержания здорового состояния дыхательной системы.

#### КАКИМ ОБРАЗОМ «КВИКС®» ОБЛЕГЧАЕТ НОСОВОЕ ДЫХАНИЕ

- Эффективно уменьшает отек носовых ходов и снимает заложенность носа
- Активно очищает носовые полости и околоносовые пазухи
- Увлажняет слизистую оболочку носа

Благодаря своим свойствам «КВИКС®» восстанавливает функции носа, и тем самым снижает риск осложнений (синусит, отит) и облегчает дыхание.

#### «КВИКС®» ОБЛАДАЕТ ТАКЖЕ СЛЕДУЮЩИМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ:

- Содержит только натуральные компоненты
- Безопасен при длительном использовании
- Не вызывает привыкания
- Не содержит консервантов

### 2. КТО МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬ «КВИКС®»

Взрослые и дети.

«КВИКС®» может применяться у беременных и кормящих женщин.

### 3. КАК ПРИМЕНЯТЬ «КВИКС®»

Всегда используйте «КВИКС®» в соответствии с данной инструкцией по применению. Если у вас возникли сомнения, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.

В начале применения возможно возникновение чувства жжения.

Дозировка:

*Детям:* 1-2 орошения носовых ходов 2-3 раза в день.

*Взрослым:* 1-3 орошения носовых ходов 2-3 раза в день.

Длительность применения не ограничена.

Пользование спреем:

Снимите колпачок. Подготовьте спрей к применению, несколько раз нажав на манжету наконечника (рис. 1). Вставьте наконечник в носовой ход и нажмите на манжету (рис. 2). Протрите наконечник салфеткой и оденьте колпачок.

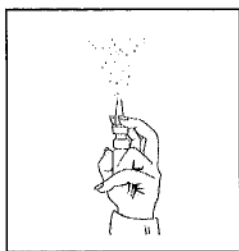


Рис. 1



Рис. 2

#### 4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Гиперчувствительность (аллергические реакции) к морской воде.

#### 5. КАК ХРАНИТЬ «КВИКС®»

Хранить при комнатной температуре.

Срок годности 3 года. После вскрытия упаковки спрей «КВИКС®» следует использовать в течение 6 месяцев.

Не используйте «КВИКС®» после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Хранить в недоступном для детей месте!

#### 6. ОПИСАНИЕ УПАКОВКИ

Флакон спрея «КВИКС®» содержит 30 мл раствора. Флакон снабжен системой антибактериальной защиты, которая предотвращает загрязнение содержимого на протяжении всего периода использования, но не более 6 месяцев.

Каждый флакон содержит около 220 доз.

СЕ

Логотип

Информация о производителе/заявителе:

Произведено:  
Лаборатории Фармастер  
ПЗ де Крафт  
67150 Эрстейн  
Франция

Произведено по заказу:  
БЕРЛИН-ХЕМИ АГ  
Глиникер Вег, 125  
12489 Берлин  
Германия

**Представитель в Республике Беларусь:**

АО «Berlin-Chemie AG» (ФРГ) Представительство в Республике Беларусь

ул. Замковая, д. 27, пом. 9, 2 этаж, оф. 2

220004, г. Минск

Республика Беларусь

т. +375 (17) 30-60-509 факс +375 (17) 30-60-510