

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Мирамил® тонзил / Miramile® tonsil спрей для полости рта и горла

Изделие медицинского назначения (класс 1)

Состав. Масло облепихи, масло мирры, масло календулы, масло апельсина, масло горького миндаля, эфирное масло тимьяна, эфирное масло мяты перечной, рапсовое масло, глицирилат аммония.

Чрезмерно большое напряжение голосовых связок (если приходится долго и громко говорить, петь), холодный или сухой воздух (при работе кондиционера, если в комнате слишком жарко, полет на самолете), во время спортивных занятий или зарядки, мелкие инородные частицы, находящиеся в воздухе (пыль, пыльца), могут вызвать сухость и раздражение в горле. Если слизистая раздражена и ослаблена, микробы значительно легче проникают в наш организм.

Содержащиеся в составе спрея для полости рта и горла Мирамил® тонзил / Miramile® tonsil растительные масла (масло облепихи, масло календулы лекарственной, рапсовое масло) образуют защитный слой, сохраняющий целостность слизистой и защищающий ее от вредных факторов внешней среды и патогенных микробов, а также благодаря увлажняющему и смягчающему действию успокаивают раздраженную слизистую и уменьшает симптомы воспаления (сухость, першение, трудно глотать, ощущение инородного тела в горле и т.п.). Эфирные масла придают приятный вкус и запах, а глицирилат аммония – сладкий привкус.

Мирамил® тонзил / Miramile® tonsil спрей для полости рта и горла используется:

- как вспомогательное средство для больного горла или полости рта (например, простуда, тонзиллит, фарингит, ларингит, стоматит, гингивит);
- для защиты раздраженной полости рта или горла;
- для увлажнения слизистой горла и глотки;
- для уменьшения отека слизистой, вызванного инфекцией;
- для улучшения естественной функции горла;
- для дезодорации полости рта.

Применение. Применять для ротовой полости и глотки. Взрослым и детям старше 2 лет впрыскивать 2 – 3 раза в день.

1. Перед применением встряхните распылитель.
2. Поверните распылитель к себе.
3. Головку распылителя поверните под углом 90°.
4. Направьте головку распылителя в область горла и побрызгайте один или два раза. При впрыскивании держите бутылочку вертикально. Во время впрыскивания рекомендуется задержать дыхание.

После применения в целях гигиены рекомендуется протереть головку распылителя влажной тряпочкой.

Противопоказания. Не применять при повышенной чувствительности к любому входящему компоненту. Не рекомендуется для новорожденных и детей младше 2 лет.

Предупреждения. Избегать попадания в глаза. При попадании средства на одежду могут остаться пятна. Раствор может быть непрозрачным из-за входящих в состав компонентов природного происхождения. При появлении нежелательного эффекта прекратите применение и обратитесь к врачу. Дети должны применять средство только под наблюдением взрослых. Если симптомы долго не проходят, необходимо проконсультироваться с врачом или аптекарем. Если упаковка повреждена, то находящееся в ней средство применять нельзя. Перед применением данного изделия прочитайте инструкцию.

Хранение. Как указано на упаковке. Хранить в недоступном и незаметном для детей месте. Указанный на упаковке срок годности действителен только при условии правильного хранения продукта.

Упаковка. Флакон темного стекла объемом 30 мл, закрученный крышкой с дозировочным насосом и распылителем с насадкой.

Срок годности: см. этикетку и упаковку продукта. По истечении срока годности, указанного на этикете флакона и коробке, Мирамил® тонзил / Miramile® tonsil использовать нельзя.

Дата изготовления: гггг.мм






Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителя:
 ООО "Акком-М", 220104, г. Минск, пер. Корженевского 28, п. 115, Республика Беларусь.



ЗАО «Валентис»
 Молету шс. 11, LT-08409, Вильнюс, Литва.

Логотип Valentis

Символы на упаковке:

	Производитель		Использовать до
	Смотреть инструкцию по применению		Температурное ограничение
	Код партии	CE	Продукт обозначен знаком CE по MDD 93/42/ЕЕС.

Дата последнего просмотра: 28/06/2019
 TF-013IFU(2)BY20190628

PAP 22

Квалифицированное лицо
 ЗАО «Валентис»

Эгидиус Гульбинас