

Yung Sheng Optical Co., Ltd.

Manufacturing facility/ Завод-изготовитель: No. 8, Keya 2nd Rd., Daya District Taichung City 42881, Taiwan, R.O.C.

Tel/ тел.: +886-4-25658384

Fax/ факс: +886-4-25658387

Инструкция линзы контактные мягкие WDL HYALURONIC FORMULA

ПОКАЗАНИЯ:
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ МНОГОЦЕЛЕВОЙ РАСТВОР WDL HYALURONIC FORMULA ОЧИЩАЕТ, ОПОЛАСКИВАЕТ, ДЕЗИНФИЦИРУЕТ, СМАЗЫВАЕТ, УВЛАЖНЯЕТ И ПОДХОДИТ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЯГКИХ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ. МНОГОЦЕЛЕВОЙ РАСТВОР WDL HYALURONIC FORMULA - ТАКЖЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО УДАЛЕНИЯ ПРОТЕИНовых ОТЛОЖЕНИЙ.

СОСТАВ:

РНМВ, ПОЛОКСАМЕР, ЕОТА, ГИАЛУРОНАТ НАТРИЯ, НРМС, ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ, ХЛОРИД НАТРИЯ, БОРНАЯ КИСЛОТА, ХЛОРИД КАЛИЯ, БЕЗВОДНЫЙ ДВУХОСНОВНЫЙ ФОСФАТ НАТРИЯ И ТРОМСТАМИН.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- ВСЕГДА МОЙТЕ РУКИ И ВЫТИРАЙТЕ ИХ ЧИСТЫМ ПОЛТЕНЦЕМ ПЕРЕД ТЕМ, КАК БРАТЬ ЛИНЗУ. ВСЕГДА НАЧИНАЙТЕ С ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ГЛАЗА, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПУТАНИЦ.
- ОТКРОЙТЕ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ.
- СНИМИТЕ ЛИНЗУ И ПОЛОЖИТЕ ЕЕ НА ЛАДОНЫ.
- НАНЕСИТЕ НЕ МЕНЕЕ 3 КАПЕЛЬ МНОГОЦЕЛЕВОГО РАСТВОРА WDL HYALURONIC FORMULA НА КАЖДУЮ СТОРОНУ ЛИНЗЫ.
- АККУРАТНО ПРОТРИТЕ ЛИНЗУ ДВИЖЕНИЕМ ВПЕРЕД И НАЗАД В ТЕЧЕНИЕ 10 СЕКУНД С КАЖДОЙ СТОРОНЫ.
- ТЩАТЕЛЬНО ПРОМОЙТЕ ОБЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛИНЗЫ С ПОМОЩЬЮ МНОГОЦЕЛЕВОГО РАСТВОРА WDL HYALURONIC FORMULA, ОСТОРОЖНО ПОТИРАЯ ЛИНЗУ МЕЖДУ БОЛЬШИМ И УКАЗАТЕЛЬНЫМ ПАЛЬЦАМИ.
- ПОМЕСТИТЕ ЛИНЗУ В КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ И ЗАПОЛНИТЕ МНОГОЦЕЛЕВЫМ РАСТВОРОМ WDL HYALURONIC FORMULA.
- ЗАКРОЙТЕ КРЫШКУ И ПЛОТНО ЗАКРУТИТЕ. ПОВТОРИТЕ ПРОЦЕДУРУ С ЛИНЗОЙ ДЛЯ ДРУГОГО ГЛАЗА.
- ОСТАВЬТЕ ЛИНЗЫ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА 6 ЧАСОВ В РАСТВОРЕ.
- ВАШИ ЛИНЗЫ ТЕПЕРЬ ЧИСТЫЕ И ПРОДЕЗИНФИЦИРОВАННЫЕ, И ИХ МОЖНО ОДЕВАТЬ.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ (ПРИЧИНЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ):

НЕТ ИЗВЕСТНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ПРИМЕНЕНИЮ МНОГОЦЕЛЕВОГО РАСТВОРА WDL HYALURONIC FORMULA, ОДНАКО, ЕСЛИ У ВАС АЛЛЕРГИЯ НА КАКИЕ-ЛИБО ИНГРЕДИЕНТЫ В СОСТАВЕ РАСТВОРА, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАСТВОР.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- * ЕСЛИ БУТЫЛКА РАЗБИТА, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ.
- * НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К КОНЧИКУ БУТЫЛКИ.
- * НЕ ПЕРЕЛИВАЙТЕ РАСТВОР В ДРУГУЮ ЕМКОСТЬ.
- * НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛЮБУЮ ВОДУ, НАПРИМЕР, ВОДУ ИЗ ПОД КРАНА ИЛИ БУТИЛИРОВАННУЮ, СПЛОНУ ПРИ КОНТАКТЕ С ЛИНЗАМИ ИЛИ КОНТЕЙНЕРОМ ДЛЯ ЛИНЗ.
- * ВСЕГДА ВЫЛИВАЙТЕ ОСТАТКИ РАСТВОРА ИЗ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ЛИНЗ ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
- * ДЕРЖИТЕ ФЛАКОН ПЛОТНО ЗАКРЫТЫМ, ЕСЛИ ОН НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.
- * ХРАНИТЕ РАСТВОР ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ (15-30 ° С).
- * ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАСТВОР ДО ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ГОДНОСТИ, УКАЗАННОГО НА КАРТОННОЙ КОРОБКЕ И ФЛАКОНЕ.
- * УТИЛИЗИРУЙТЕ ОСТАВШИЙСЯ РАСТВОР ЧЕРЕЗ 3 МЕСЯЦА ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ.
- * ХРАНИТЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
 - * ПРОБЛЕМЫ С КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ И СРЕДСТВАМИ ПО УХОДУ ЗА ЛИНЗАМИ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ИНФЕКЦИИ РОГОВИЦЫ И / ИЛИ ЯЗВЕ, А ТАКЖЕ К ПОТЕРЕ ЗРЕНИЯ.
 - * ЛИНЗЫ ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОГО НОШЕНИЯ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ НОШЕНИЯ НА НОЧЬ, И ИХ НЕ СЛЕДУЕТ НОСИТЬ ВО ВРЕМЯ СНА.
 - КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ, ЧТО ПРИ НОШЕНИИ ЛИНЗ НА НОЧЬ ПОВЫШАЕТСЯ РИСК СЕРЬЕЗНЫХ ПОБОЧНЫХ РЕАКЦИЙ.

* ЛИНЗЫ ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОГО НОШЕНИЯ СЛЕДУЕТ РЕГУЛЯРНО СНИМАТЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ДЕЗИНФИКЦИИ ИЛИ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ГРАФИКОМ, ПРЕДПИСАННЫМ ВАШИМ ОФТАЛЬМОЛОГОМ. ИССЛЕДОВАНИЯ ТАКЖЕ ПОКАЗАЛИ, ЧТО РИСК СЕРЬЕЗНЫХ ПОБОЧНЫХ РЕАКЦИЙ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ СРОКА НОШЕНИЯ ЛИНЗ ДЛИТЕЛЬНОГО НОШЕНИЯ ДО СНЯТИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ДЕЗИНФИКЦИИ ИЛИ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ. ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ (ПРОБЛЕМЫ И ЧТО ДЕЛАТЬ):

- * ЕСЛИ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ: ЖЖЕНИЕ В ГЛАЗАХ, РАЗДРАЖЕНИЕ, ЗУД, УМЕНЬШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПРЕДЕТОВ, ЧРЕЗМЕРНОЕ СЛЕЗОТЕЧЕНИЕ, НЕОБЫЧНУЮ СЕКРЕЦИЮ ГЛАЗ, ПОКРАСНЕНИЕ ГЛАЗ, ИЗМЕНЕНИЕ ЗРЕНИЯ, ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К СВЕТУ ИЛИ СУХОСТЬ, НЕМЕДЛЕННО СНИМИТЕ ЛИНЗЫ.
- * ЕСЛИ ДИСКОМФОРТ ИЛИ ПРОБЛЕМА ИСЧЕЗНЕТ, ВНИМАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ НА ЛИНЗУ.
- * ЕСЛИ ЛИНЗА КАКИМ-ЛИБО ОБРАЗОМ ПОВРЕЖДЕНА, НЕ НАДЕВАЙТЕ ГЛАЗ. ПОМЕСТИТЕ ЛИНЗУ В ФУТЛЯР ДЛЯ ЛИНЗ И ОБРАТИТЕСЬ К ОФТАЛЬМОЛОГУ.
- * ЕСЛИ НА ЛИНЗЕ ЕСТЬ ГРЯЗЬ, РЕСНИЦЫ ИЛИ ДРУГОЙ ПОСТОРОННИЙ ПРЕДМЕТ, ИЛИ ПРОБЛЕМА УСТРАНЯЕТСЯ И ЛИНЗА КАЖЕТСЯ НЕПОВРЕЖДЕННОЙ, ТЩАТЕЛЬНО ОЧИСТИТЕ, ПРОМОЙТЕ И ПРОДЕЗИНФИЦИРУЙТЕ ЛИНЗУ, А ЗАТЕМ СНОВА ВСТАВЬТЕ ЕЕ.
- * ЕСЛИ ПРОБЛЕМА НЕ ИСЧЕЗНЕТ, НЕМЕДЛЕННО СНИМИТЕ ЛИНЗЫ И НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СВОИМ ОФТАЛЬМОЛОГОМ.

ИМПОРТЕР: УП "ВДЛ"
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, Г.МИНСК, 220073,
УП. КАЛЬВАРИЙСКАЯ 25, ПОМ. 419.

YUNG SHENG OPTICAL CO., LTD NO.8, KEYA
2ND ROAD, DAYA DISTRICT, TAICHUNG CITY
42881, TAIWAN.

WELKANG LTD.
THE BLACK CHURCH, ST. MARY'S PLACE,
DUBLIN 7, D07 P4AX, IRELAND

"15" февраля 2022 г.

Л.А. Кургузова

По доверенности от 11.10.2021г