

Текст инструкции по применению медицинского изделия **Miramile® Nasal / Мирамил Назал спрей для носа**

Miramile® Nasal/Мирамил Назал
Спрей для носа

Изделие медицинского назначения (класс 1)

Состав. Масло СЦТ (Среднецепочечные триглицериды), масло облепихи, масло календулы, масло сладкого апельсина, эфирное масло эвкалипта, эфирное масло тимьяна, dl- α -токоферол ацетат.

Miramile® Nasal / Мирамил Назал состоит из смеси растительных масел (среднецепочечные триглицериды, масло облепихи и масло календулы), которые обладают увлажняющими, смягчающими, смазывающими и защитными свойствами, успокаивают и защищают сухую и раздраженную слизистую оболочку, а кроме того, содержат некоторые эфирные масла для дезодорации. Смесь растительных масел, покрывая поверхность слизистой носа несколько раз в день, образует на слизистой верхний водостойкий слой, защитный барьер, который способствует поддержанию целостности слизистой, защищая ее от внешних повреждающих агентов и патогенных микробов. Когда спрей попадает в носовую полость, он способствует выведению слизистых отложений и уменьшает проявления сухости, а также увлажняет и успокаивает раздраженную слизистую оболочку и уменьшает раздражение и зуд.

Miramile® Nasal / Мирамил Назал предназначен для смягчения и увлажнения слизистой носа, уменьшения сухости, раздражения, зуда в носу и предотвращения образования корок, что вызвано такими факторами, как:

- Низкая влажность в помещениях из-за отопления или кондиционирования воздуха,
- Побочные эффекты от применения определенных лекарств,
- Простуда или другие заболевания верхних дыхательных путей,
- Возрастные изменения слизистой оболочки и низкие значения влажности назального секрета.

Применение. Для носовой полости. Перед применением взболтать. Взрослым и детям старше 3 лет рекомендуется от одного до трех впрыскиваний в каждую ноздрию три раза в день. После впрыскивания осторожно сожмите ноздри вместе на несколько секунд.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к любому компоненту, входящему в состав. Не разрешено применять детям до 3 лет.

Предупреждение. Избегать попадания в глаза. При попадании на одежду могут остаться пятна. При появлении нежелательного эффекта прекратите использование и обратитесь к врачу. Дети должны применять препарат под наблюдением взрослых. Если симптомы долго не проходят, необходимо проконсультироваться с врачом. При поврежденной упаковке не применять. Перед применением данного изделия прочитайте инструкцию.



Хранение. Как указано на упаковке. Хранить в недоступном и незаметном для детей месте. Срок годности, указанный на упаковке, действителен только при надлежащем хранении препарата.

Упаковка. Флакон из темного стекла объемом 20 мл с насосом и насадкой-распылителем.

Срок годности. См. на этикетке и упаковке изделия. Не используйте Miramile® Nasal / Мирамил Назал по окончании срока годности, указанного на этикетке или коробке.



Valentis AG
Ул. Лугано 13, CH-6982 Агно, Швейцария

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителя:
ООО "Акком-М", 220104, г. Минск, пер. Корженевского 28, п. 115, Республика Беларусь.

Логотип Valentis

Обозначения на упаковке:

	Производитель		Срок годности
	Обратитесь к инструкции по применению		Температурный режим
	Код партии		Дата изготовления
	Изделие обозначено знаком CE в соответствии с MDD 93/42/ЕЕС.		

РАР 22

Дата последнего пересмотра: 16/11/2021

Уполномоченное лицо

Герда Круповиесиене

Valentis AG
Via Lugano 13
CH-6982 Agno, Switzerland