



Mascia Brunelli S.p.a.

V.le. Monza, 272
20128 Milano - Italy
Tel 02.25.209.1 r.a.
Fax 02.25.76.428
E-mail: info@masciabrunelli.it
sito: www.masciabrunelli.it

Sistema Qualità Certificato
EN ISO 13485
Cert n 2003.46.01/0
EN ISO 9001:2000
Cert n 2003.54.01/0

CUTANPLAST® СТЕРИЛЬНЫЕ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ЖЕЛАТИНОВЫЕ ГУБКИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CUTANPLAST® СТЕРИЛИЗОВАН ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЕМ

Руководство:

CUTANPLAST прикладывается непосредственно на поврежденную область, если необходимо - с небольшим надавливанием. CUTANPLAST прикладывается к промытой ране в сухом виде, либо предварительно увлажнив в стерильном физиологическом растворе. При наложении немного надавить, пока не произойдет сцепление фибрина. Может быть оставлен на месте или убран после остановки кровотечения. Продукт полностью абсорбируем в течение примерно 3 недель. Размер CUTANPLAST, который необходимо использовать, пропорционален размеру места кровотечения. CUTANPLAST разрезается стерильными ножницами, но не рвется и не ломается. CUTANPLAST имеет меньшую клейкость по сравнению с марлевыми тампонами.

Предупреждение:

Перед использованием проверить целостность упаковки. Стерильность гарантируется только если упаковка сухая и не повреждена. Использовать сразу после открытия упаковки. Не использовать продукт после истечения срока годности, указанного на упаковке. При использовании продукта следует поддерживать строгие асептические условия.

Неиспользованные части изделия не могут быть стерилизованы вновь и должны быть уничтожены. Кровоостанавливающие возможности CUTANPLAST не должны заменять обычные процедуры по остановке кровотечения (накладывание швов, сдавливание, перевязка).

Когда CUTANPLAST вводится в полость, рекомендуется сдавить его, так как после абсорбции влаги продукт расширяется и может давить на окружающие ткани. В нейрохирургии губка не должна оставаться в закрытой полости, так как, набухая, может спровоцировать давление на нервные ткани. CUTANPLAST, как и все желатиновые кровоостанавливающие губки, имеет цель содействовать остановке кровотечения: любое другое его применение должно быть предварительно внимательно взвешено потребителем. Держать в недоступном месте от детей.

Не использовать CUTANPLAST для пациентов, имеющих аллергию на свиной желатин.

Противопоказания:

Не использовать на зараженных ранах.

Условия хранения:

Хранить в сухом месте при комнатной температуре.

Доступные размеры:

CUTANPLAST Standard	50x70x10 мм	05170502
CUTANPLAST Special	50x70x1 мм	05380502
CUTANPLAST Anal	80x30ø мм	05480302
CUTANPLAST Dental	10x10x10 мм	05610101
CUTANPLAST Film	70x200x0.5 мм	05770202


CUTANPLAST Dial	30x30x10 мм	05230302
CUTANPLAST Small	50x30x10 мм	05850302
CUTANPLAST Large	80x125x10 мм	058801251
CUTANPLAST 20x60	20x60x7 мм	05520602
CUTANPLAST 80x20	20x80x10 мм	05580202
CUTANPLAST 80x50	80x50x10 мм	05180502
CUTANPLAST Powder	1 гр	05200001
CUTANPLAST Powder	5 гр	05200005

Производитель не несет ответственность за последствия, вызванные неправильным использованием продукта.

Dr.ssa Beatrice Brunelli
MASCIA BRUNELLI Spa



MASCIA BRUNELLI SPA
 Via Mazzini, 270 - 00147 Roma (RM)
 Tel. +39 06 252081 - Fax +39 06 252082
 Pagine Gialle 06 44120114

Копия соответствует оригиналу.  В.А.Ераховец
 По доверенности от 08.05.2023 г.