

Катионорм®

Защитные капли для глаз, эмульсия



Перед применением, пожалуйста, внимательно прочитайте данную Инструкцию. Сохраните данную инструкцию на случай, если Вам понадобится прочитать ее еще раз. Если у Вас возникнут какие-либо дополнительные вопросы, обратитесь к вашему лечащему врачу или фармацевту. Если симптомы не исчезают, обратитесь за консультацией к вашему лечащему врачу.

1. Что такое Катионорм® и для чего его применяют

Катионорм® – это офтальмологическая стерильная гипотоническая эмульсия для глаз в виде жидкости молочного цвета, не содержащая консервантов.

Катионорм® содержит: минеральные масла, глицерин, тилоксапол, полоксамер 188, трис-гидрохлорид, триметамин, цеталкония хлорид (катиогенное вещество) и очищенную воду.

В одном флаконе препарата Катионорм® содержится 10 мл стерильной эмульсии.

Катионорм® предназначен для устранения симптомов «сухого глаза», проявляющихся в виде покалывания, зуда, жжения или ощущения инородного тела в глазу (песка или пыли). Данные симптомы могут быть вызваны внешними факторами (такими как работа кондиционера, загрязнение, путешествие на самолете, работа за компьютером, рефракционная хирургия, ношение контактных линз и т.д.) или патологиями, такими как дисфункция мейбомиевых желез.

Катионорм® увлажняет, смазывает и защищает поверхность глаза.

2. Перед применением препарата Катионорм®

Не применяйте Катионорм®, если у Вас есть аллергия на какой-либо из компонентов препарата.

Препарат не предназначен для лечения других заболеваний глаз. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, обратитесь за консультацией к вашему лечащему врачу или фармацевту.

Если Вы одновременно применяете другие глазные капли, интервал между закапываниями каждого следующего препарата должен составлять не менее 5 минут. При этом, рекомендуется закапывать препарат Катионорм® последним.

Катионорм® совместим со всеми видами контактных линз.

3. Как применять Катионорм®

Для закапывания в глаз.

Рекомендуемый режим дозирования по 1 капле 1 - 4 раза в день.


Инструкции по применению:



- Вымойте руки.
- При использовании флакона с глазными каплями в первый раз, снимите с колпачка защитное кольцо, потянув за отгибаемый клапан.



- Откройте флакон, осторожно потянув за колпачок.
- Расположите корпус флакона между большим и указательным пальцами.
- Избегайте любого контакта между кончиком флакона и вашими пальцами.

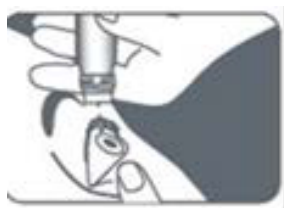

- Запрокиньте голову.
- Осторожно оттяните нижнее веко и посмотрите вверх.
- Держите флакон над глазом и прикоснитесь тыльной стороной руки ко лбу.



- Осторожно выдавите одну каплю в глаз и поморгайте несколько раз.
- Не касайтесь кончиком флакона глаза и ресниц.
- После каждого применения закрывайте флакон колпачком.
- Храните флакон в картонной упаковке, если вы не используете препарат.

Не применяйте Катионорм® более трех месяцев после первого вскрытия флакона.



Использование флакона более трех месяцев после первого вскрытия подвергает Вас риску инфицирования.

4. Возможные побочные действия

В очень редких случаях может возникнуть кратковременный дискомфорт, а именно: раздражение глаз, боль в глазу, ощущение инородного тела в глазу, покраснение глаз, покалывание в глазу, слезотечение, чувство жжения в глазу, временная нечеткость зрения, воспаление век или отек век. Эти симптомы также являются частью симптомов, характерных для заболевания сухости глаз, связанного с существующими основными заболеваниями глаз пациента, который имеет сухость глаз.

ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ КАКИЕ-ЛИБО ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ НЕ УКАЗАНЫ В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ, СООБЩИТЕ О НИХ ВАШЕМУ ЛЕЧАЩЕМУ ВРАЧУ ИЛИ ФАРМАЦЕВТУ.

5. Как хранить Катионорм®

Хранить флакон при температуре не выше 30 °С в картонной упаковке.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не использовать поврежденный флакон.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Далее запишите дату, когда вы открыли флакон в первый раз: _____

Владелец ЕС сертификата в Европе

Santen, 1 rue Pierre Fontaine – Bâtiment Genavenir IV, 91000 Evry, Франция

Производитель:

Santen, 1 rue Pierre Fontaine – Bâtiment Genavenir IV, 91000 Evry, Франция

на заводе:

Laboratoires Pharmaster, Z.I. de Krafft, 67150 Erstein, Франция

Дистрибьютор:

Santen Oy, 33720 Tampere, Финляндия

Уполномоченный представитель на территории Республики Беларусь:

Представительство компании Santen Oy, Финляндия в РБ

220028 г. Минск, ул. Маяковского, 144, пом.8, каб.12, тел.: +375 17 3018788

Дополнительная информация в виде символов на упаковке

Символ									
Значение	Производитель	Дата производства	Хранить при температуре не выше 30°C	Стерильно	Номер серии	Годен до	Перед употреблением прочитайте инструкцию по применению	Соответствие требованиям Директив Европейского Союза и гармонизированных стандартов	Использовать в течение 3 месяцев после первого вскрытия флакона



SANTEN SAS
 1, rue Pierre Fontaine
 Bâtiment GENAVENIR IV
 91000 EVRY
 FRANCE

Tel : +33(0)1 69 87 40 20 – Fax : +33 1 69 87 40 30
 432 584 225 RCS Evry – TVA FR 66 432 584 225